



ÉLECTRODES GUIDE D'UTILISATION


Fiches pratiques TENS

■ Guide d'utilisation pour électrodes autocollantes repositionnables


En prenant soin de vos électrodes, vous augmenterez leur durée de vie et le confort de stimulation.




1 - Assurez-vous que la peau est propre, sèche, sans aucune crème ou lotion.

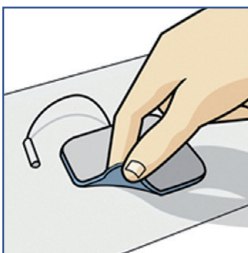

2 - Retirer l'électrode de son support en la saisissant par le bord ou l'onglet prévu à cet effet.

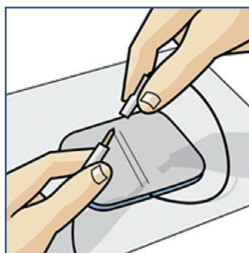

3 - Insérer la fiche banane du câble de stimulation dans la connectique de l'électrode en saisissant fermement les coques plastiques.

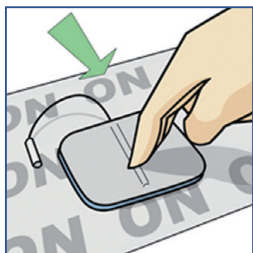

4 - Repositionner toujours l'électrode sur la face ON du support plastifié.




5 - Ne jamais plonger l'électrode dans l'eau.



6 - Ne jamais décoller l'électrode de son support en saisissant le câble de connectique.



7 - Ne jamais déconnecter l'électrode en tirant sur les câbles de connexion.

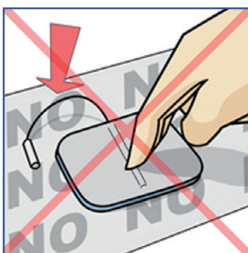

8 - Ne pas repositionner l'électrode sur la face NO du support plastifié.

- L'usage individuel des électrodes est recommandé.
- Se reporter au manuel d'utilisation du stimulateur pour connaître le format d'électrode adapté à chaque zone anatomique.
- Une légère noisette de gel peut être ajoutée sous l'électrode.
- Toujours repositionner les électrodes dans leur emballage d'origine et les stocker à température ambiante.
- Des électrodes pour peaux sensibles sont recommandées en cas d'allergies.