


chattanooga® Cefar TENS | Guide Placement Électrodes




Les chiffres ① représentent les électrodes correspondant au canal 1.
Les chiffres ② représentent les électrodes correspondant au canal 2.

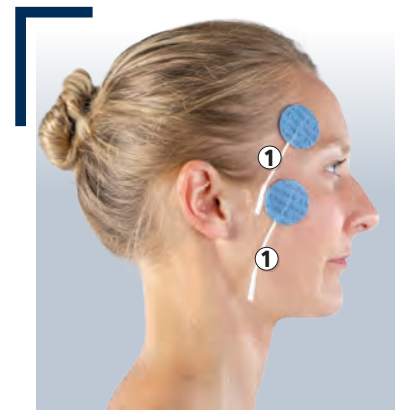


Céphalées de Tension Fronto-Temporales : P4




Douleur du Coude : P1, P4
Option 1

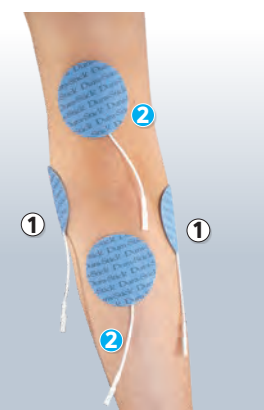


Douleur du Coude : P1, P4
Option 2

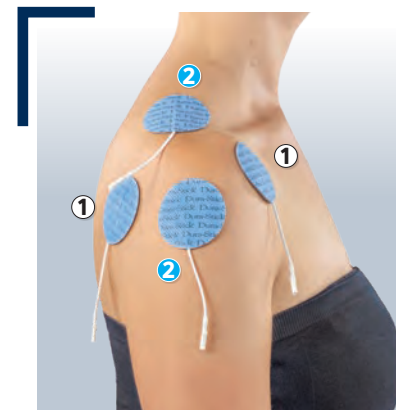


Douleur de l'épaule : P1, P4

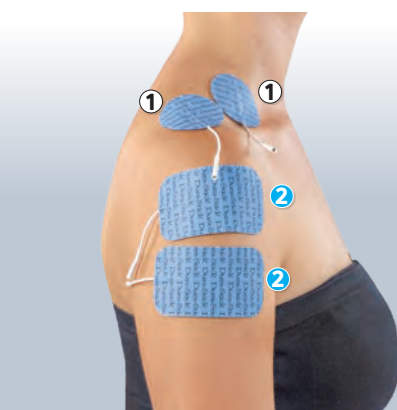


Algoneurodystrophie SDRC épaule : P4

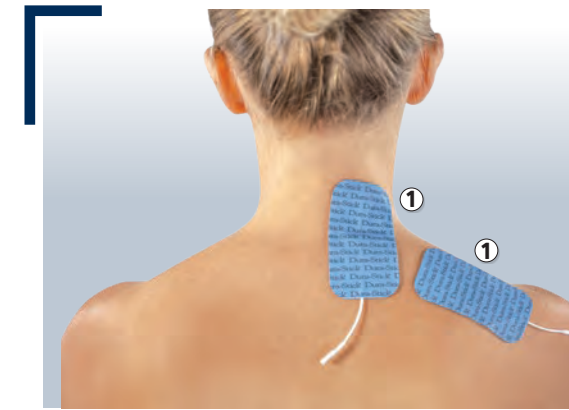

Cervicalgie - Céphalées Cervicogéniques : P5
Option 1

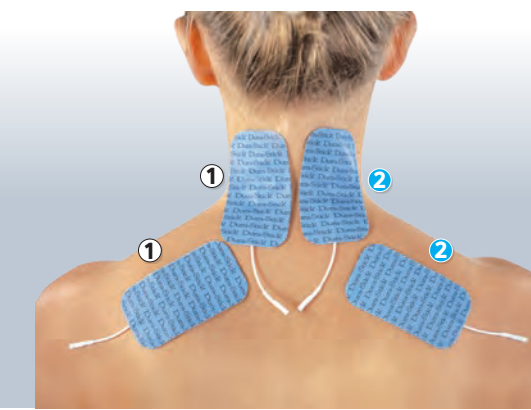


Cervicalgie - Céphalées Cervicogéniques : P2, P5 ou P3
Option 2

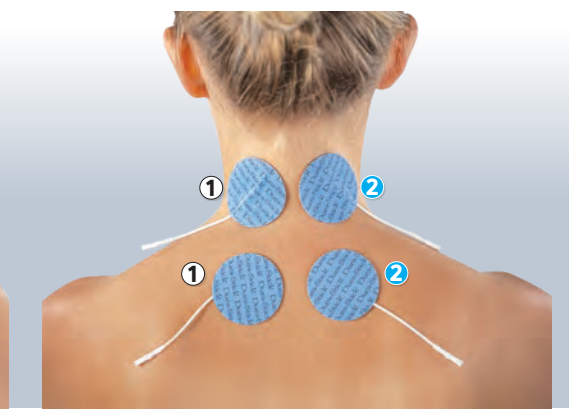


Cervicalgie - Céphalées Cervicogéniques : P2, P5 ou P3
Option 3




Algoneurodystrophie SDRC Main : P4

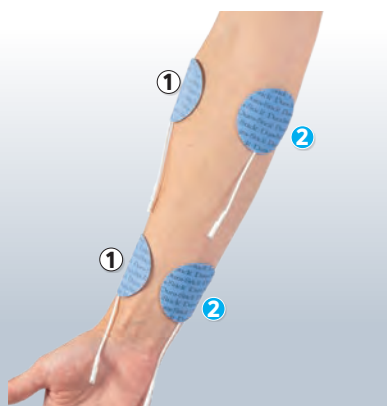

Douleur de l'Avant-Bras : P1, P4

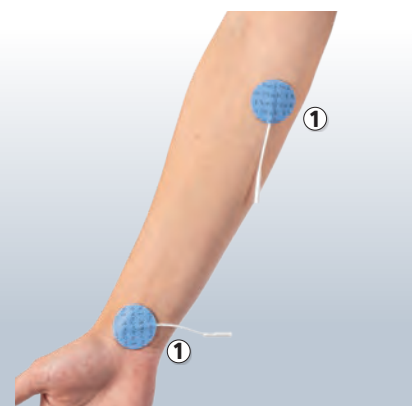

Cervico-Brachialgie et Canal Carpien : P1, P4

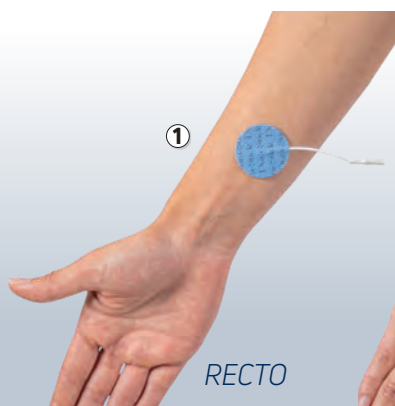


Traitement des Nausées : P6




RECTO
VERSO




PROFIL

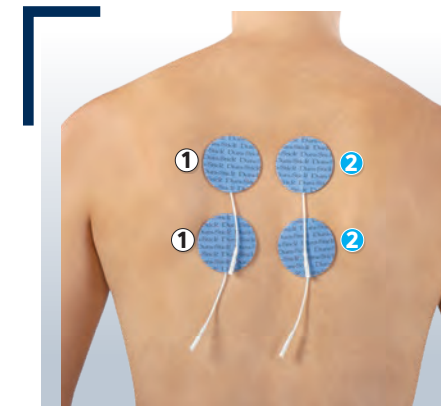


Dorsalgie : P1, P4
Option 1

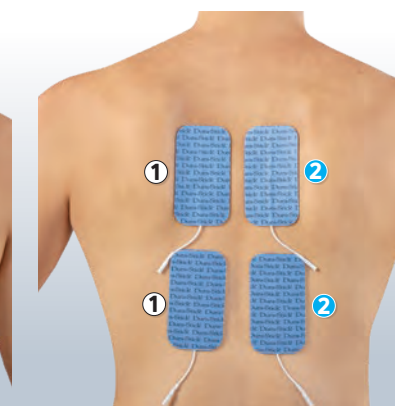


Dorsalgie : P1, P4
Option 2

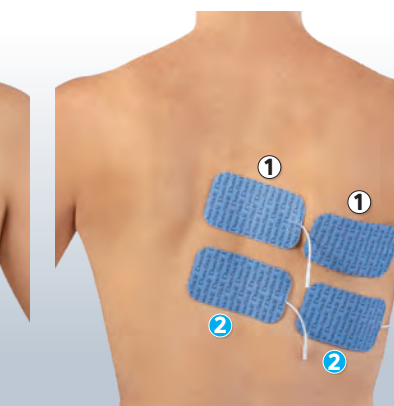


Neuropathie Post-Zostérienne : P1, P4
Option 1

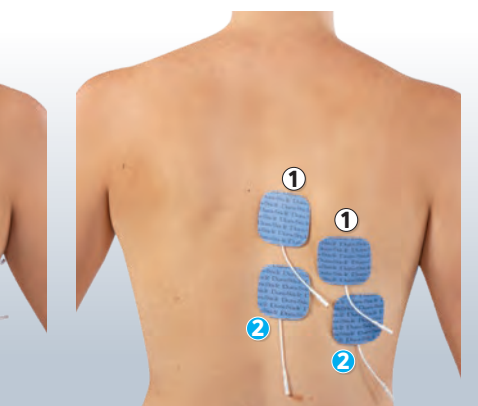


Neuropathie Post-Zostérienne : P1, P4
Option 2

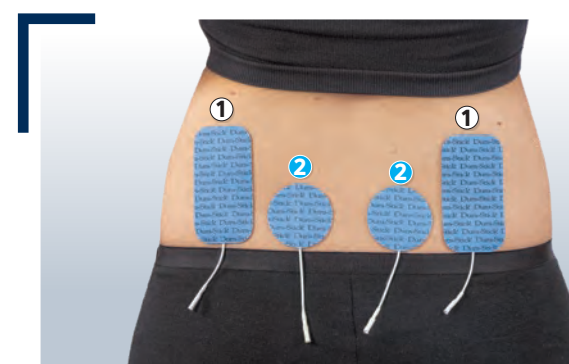


Lombalgie : ① en P1 et ② en P2
Option 1

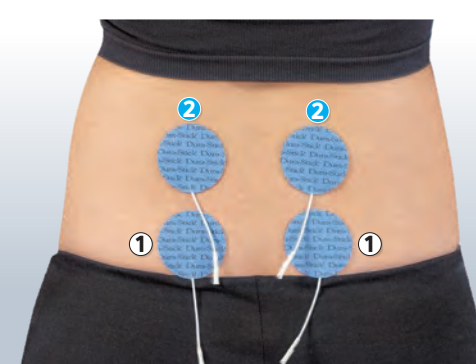


Lombalgie : P7
Option 2

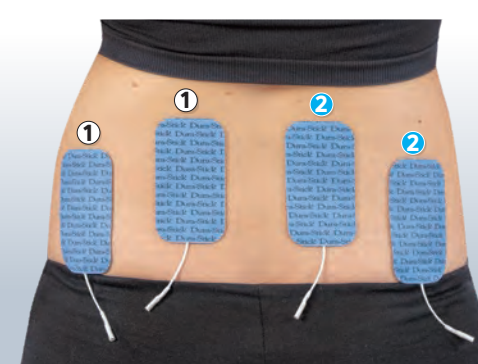


Lombalgie : P2, P5 ou P3
Option 3

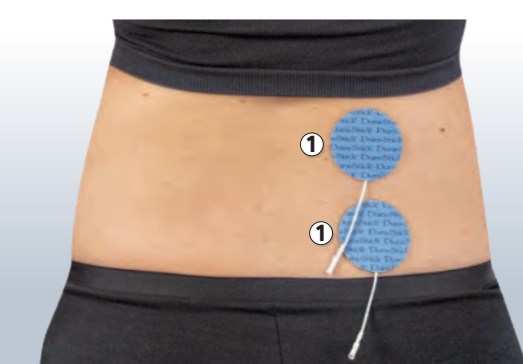


Lombalgie Unilatérale : P2, P5 ou P3

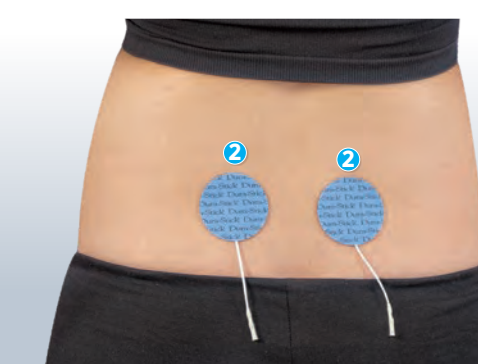

Névralgie Pudendale : P6, P4

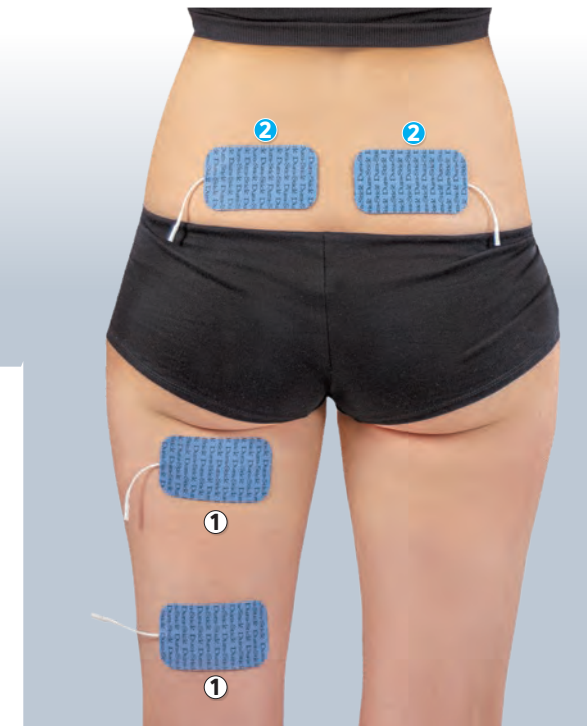

Lombosciatalgie : ① en P1 et ② en P2

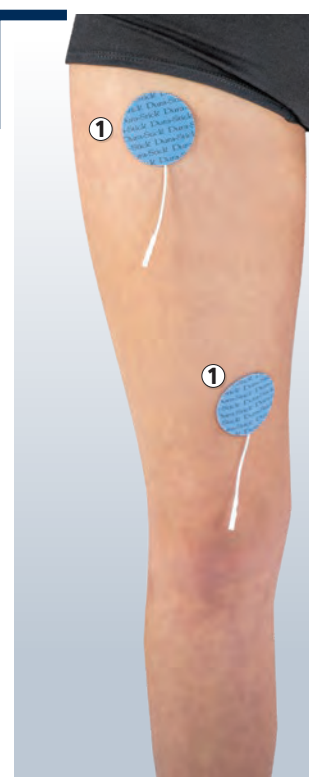


Cruralgie : P1, P4



Algoneurodystrophie SDRC Genou : P4



Douleur du Genou : P1, P4. Option 1

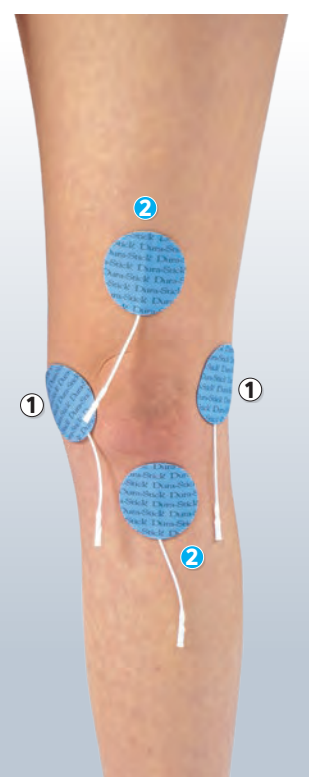

Douleur du Genou : P1, P4. Option 2




Algoneurodystrophie SDRC Cheville-Pied : P4



Névralgie Pudendale : P6, P4

Douleur de la Cheville : P1, P4

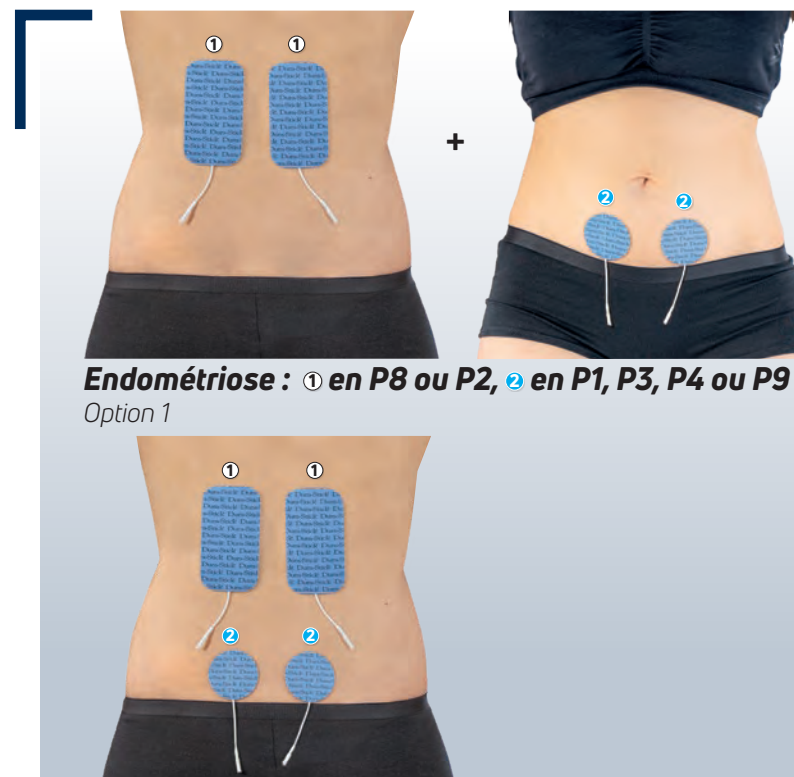

Endométriose : ① en P8 ou P2, ② en P1, P3, P4 ou P9
Option 1

Endométriose : ① en P8 ou P2, ② en P1, P3, P4 ou P9
Option 2



Vidéo
Présentation
Cefar TENS
Chattanooga®



Tutoriel
utilisation du
Cefar TENS
Chattanooga®

cefartens.fr

Retrouvez toutes les informations sur le produit et la méthode TENS, nos protocoles, vidéos, tutos, foire aux questions...

enovis

Enovis™ - DJO France S.A.S - Centre Européen de Fret - 3 rue de Bethar - 64990 Mouguerre



Les chiffres ① représentent les électrodes correspondant au canal 1.
Les chiffres ② représentent les électrodes correspondant au canal 2.




Céphalées de Tension Fronto-Temporales : P4




Douleur du Coude : P1, P4
Option 1




Douleur du Coude : P1, P4
Option 2

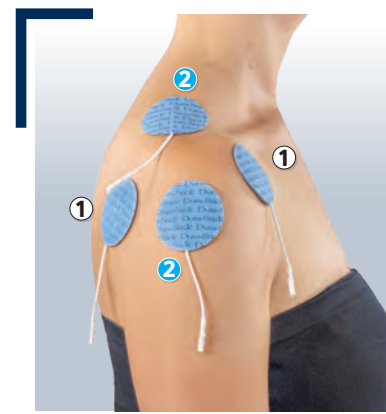


Douleur de l'épaule : P1, P4

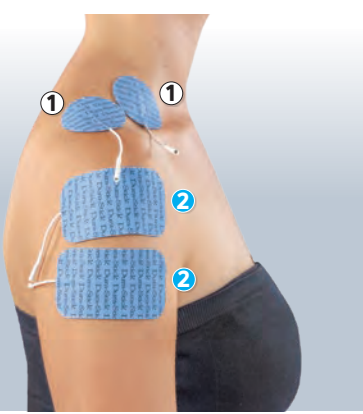


Algoneurodystrophie SDRC épaule : P4

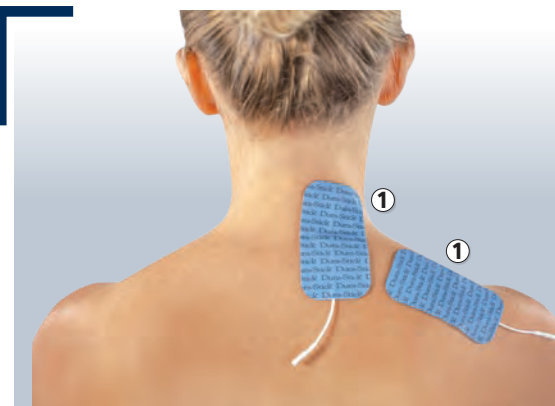


Cervicalgie - Céphalées Cervicogéniques : P5
Option 1

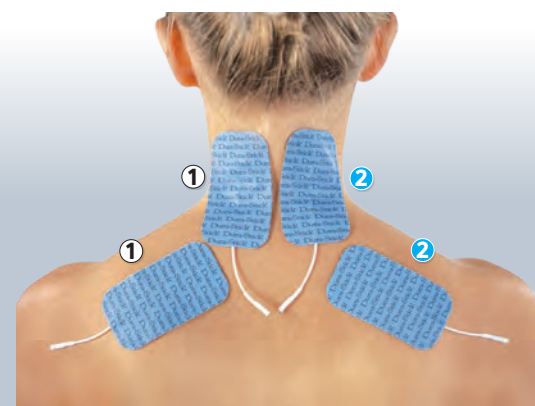


Cervicalgie - Céphalées Cervicogéniques : P2, P5 ou P3
Option 2

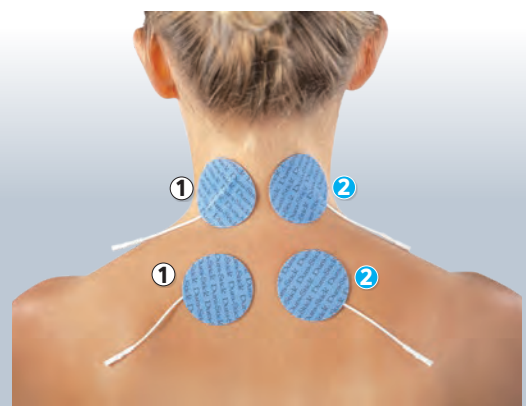

Cervicalgie - Céphalées Cervicogéniques : P2, P5 ou P3
Option 3

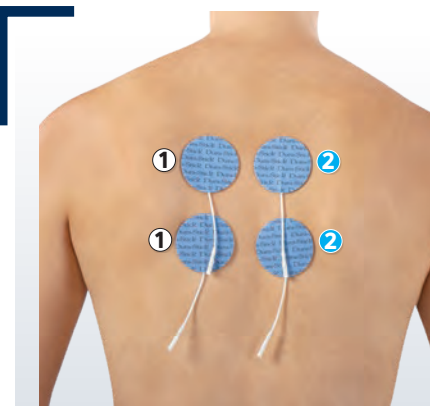


Dorsalgie : P1, P4
Option 1

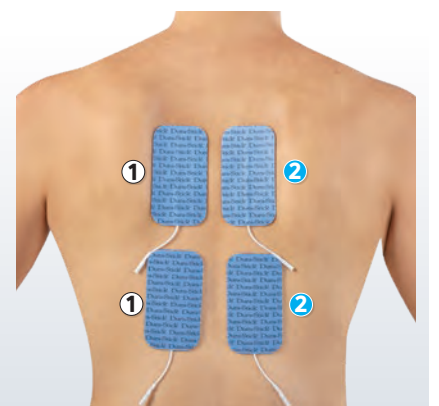

Dorsalgie : P1, P4
Option 2



Algoneurodystrophie SDRC Main : P4

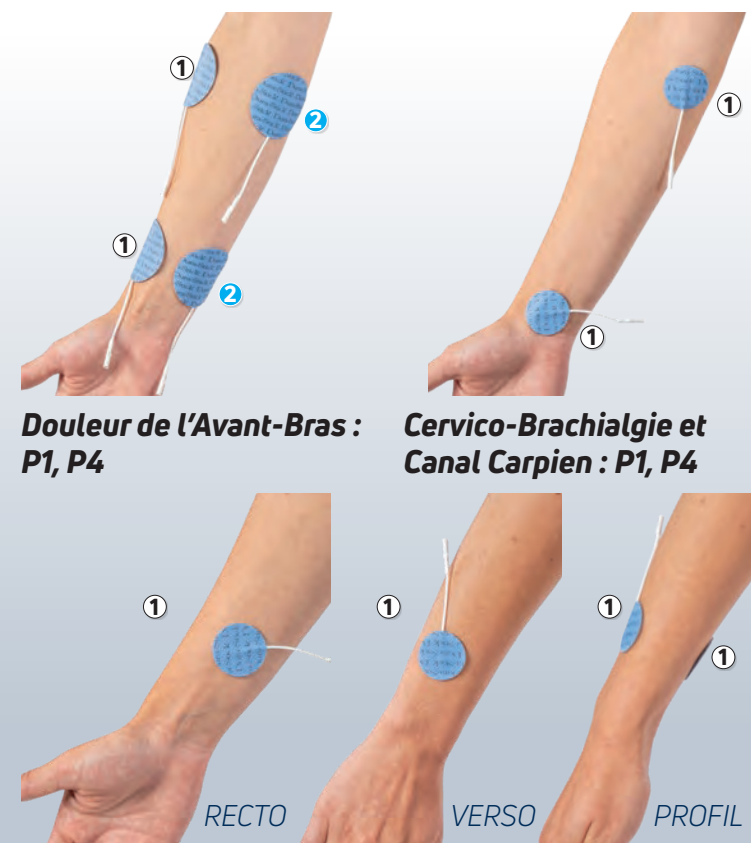


Douleur de l'Avant-Bras : P1, P4
Cervico-Brachialgie et Canal Carpien : P1, P4


Traitement des Nausées : P6




Lombosciatalgie : ① en P1 et ② en P2

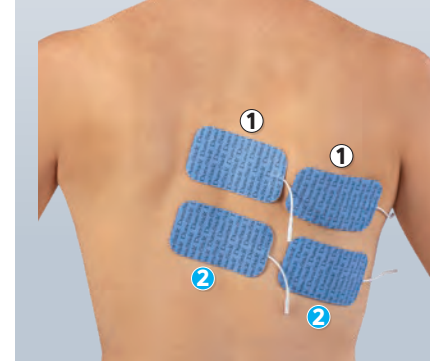


Neuropathie Post-Zostérienne : P1, P4
Option 1

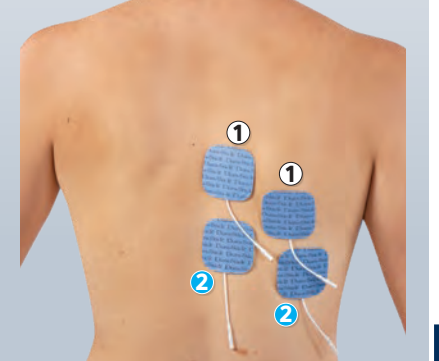


Neuropathie Post-Zostérienne : P1, P4
Option 2

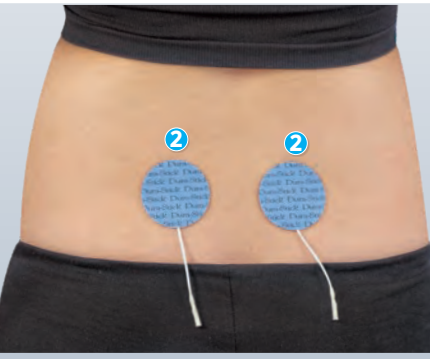


Néuralgie Pudendale : P6, P4

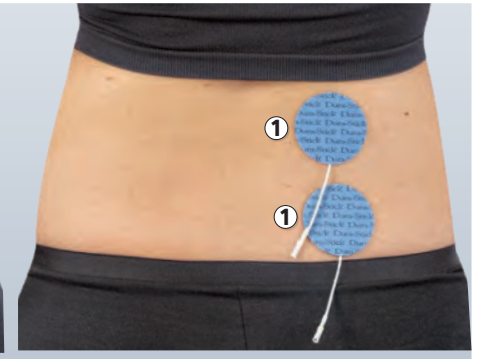

Lombalgie Unilatérale : P2, P5 ou P3

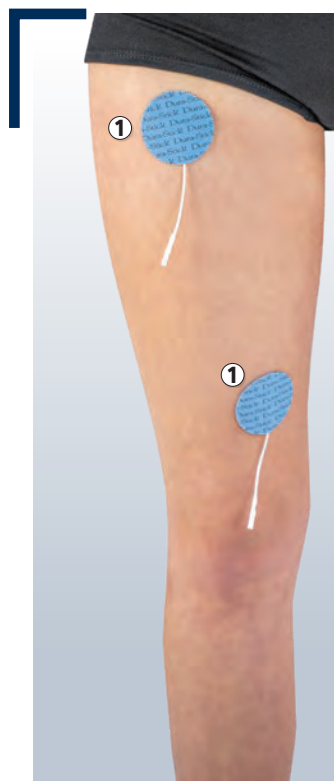


Cruralgie : P1, P4

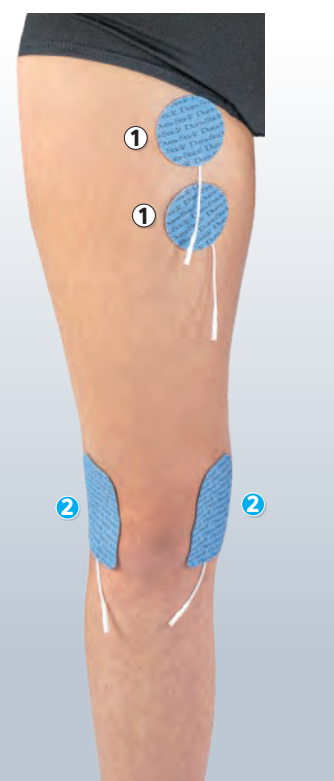


Algoneurodystrophie SDRC Genou : P4




Douleur du Genou : P1, P4. Option 1

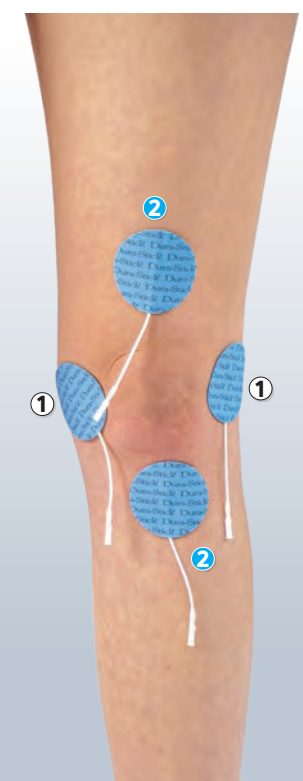


Douleur du Genou : P1, P4. Option 2

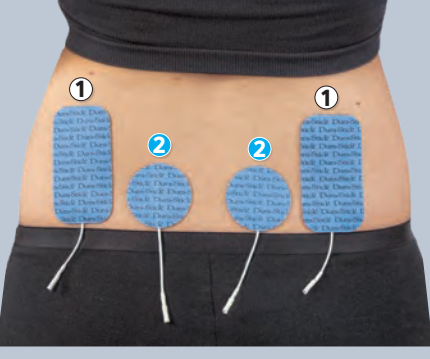

Lombalgie : ① en P1 et ② en P2
Option 1

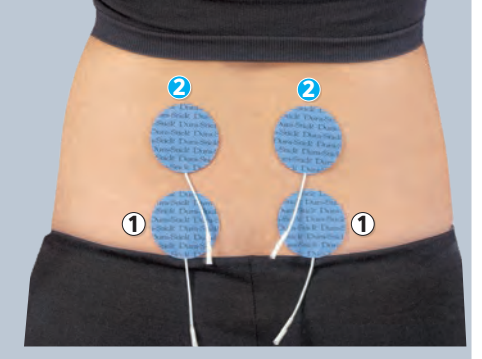

Lombalgie : P7
Option 2

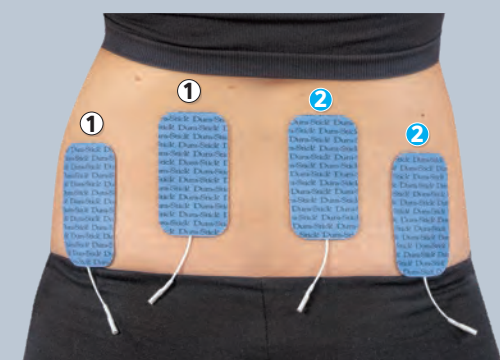

Lombalgie : P2, P5 ou P3
Option 3



Algoneurodystrophie SDRC Cheville-Pied : P4




Neuromodulation Nerf Tibial Postérieur




Néuralgie Pudendale : P6, P4

Douleur de la Cheville : P1, P4

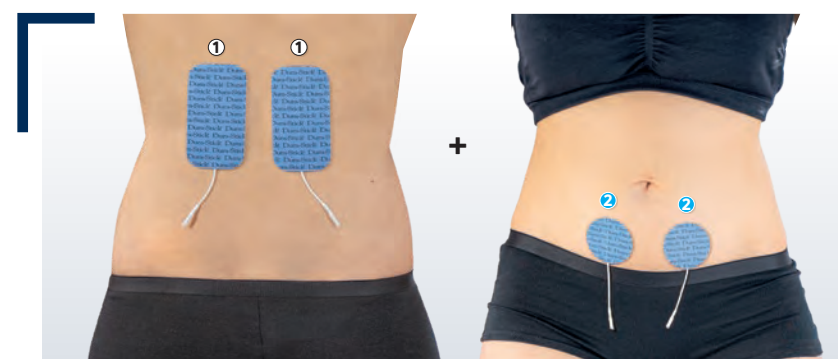

Endométriose : ① en P8 ou P2, ② en P1, P3, P4 ou P9
Option 1

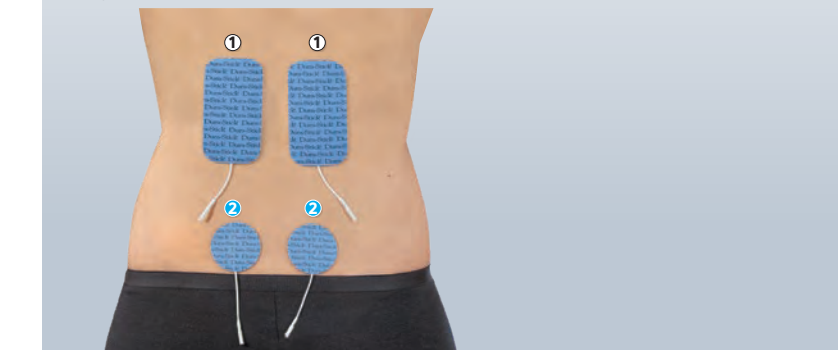

Endométriose : ① en P8 ou P2, ② en P1, P3, P4 ou P9
Option 2



Vidéo Présentation Cefar TENS Chattanooga®



Tutoriel utilisation du Cefar TENS Chattanooga®

cefartens.fr
Retrouvez toutes les informations sur le produit et la méthode TENS, nos protocoles, vidéos, tutos, foire aux questions...

enovis
Enovis™ - DJO France S.A.S
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre

