



LES ÉLECTRODES

[FICHE PRATIQUE TENS]

QUALITÉ, CONFORT, EFFICACITÉ

La qualité d'un traitement antalgique par neurostimulation transcutanée TENS est directement liée à la qualité des électrodes utilisées. Ces électrodes sont livrées avec l'appareil (en location comme à l'achat) mais demandent à être renouvelées régulièrement.

Le gel MultiStick® des électrodes Dura-Stick® Nerve fait la différence :

- Il assure une intensité stable au cours du traitement,
- Il augmente la longévité de l'adhérence,
- Il permet une répartition homogène du courant sur toute la surface permettant :
 - d'améliorer le confort du patient pendant la stimulation,
 - d'atténuer les sensations désagréables de picotements, points « chauds ».

Le Blue Gel hypoallergénique (Dura-Stick® Nerve Blue gel) est préconisé pour les patients présentant des rougeurs suite à l'utilisation du TENS, pour les peaux sensibles.

LA CONNECTIQUE : Les électrodes Dura-Stick® proposent une connectique conventionnelle adaptée à différents types de TENS dont le Cefar TENS : fiches banane mâles 2 mm.

LE FORMAT : Les électrodes Dura-Stick® Nerve existent dans de nombreux formats adaptés à toutes les zones anatomiques : Rondes diamètre 32 mm ou 50 mm, Carrées, Rectangulaires. Les électrodes Dura-Stick® Nerve Blue gel sont proposées en carrée et rectangulaire.

LA MÉTHODE DE CONDUCTION : Les électrodes Dura-Stick® proposent la technologie révolutionnaire à 1000 brins d'acier pour une meilleure répartition du courant, un meilleur confort et une plus grande longévité.

SOUPLESSE : Liées au film recouvrant la partie supérieure des électrodes, les électrodes Dura-Stick® Nerve proposent un revêtement en textile souple. Cette souplesse est encore favorisée par le polyuréthane proposé par les électrodes Dura-Stick® Blue Gel.



LONGÉVITÉ : Les électrodes Dura-Stick® permettent la réalisation d'une quarantaine de séances. Si les électrodes ne collent plus assez bien ou pour les patients présentant une forte pilosité, il peut être conseillé d'utiliser un gel pour électrode.

PRESCRIRE LES ÉLECTRODES

Les électrodes sont remboursées à hauteur d'un lot maximum de 4 électrodes autocollantes tous les 15 jours.

La prescription d'électrodes est une ligne s'ajoutant à la prescription initiale de location ou d'achat d'un neurostimulateur ou en renouvellement si nécessaire :

Libellé de l'ordonnance :

- Exemple location de TENS : Location d'un neurostimulateur transcutané à visée antalgique type Cefar TENS pour une séance de ... minutes et ... fois par jour. Achat d'un jeu de quatre électrodes renouvelables tous les quinze jours, taille ...
- Exemple achat de TENS : Achat d'un neurostimulateur transcutané à visée antalgique type Cefar TENS pour une séance de ... minutes et ... fois par jour. Achat d'un jeu de quatre électrodes renouvelables tous les quinze jours, taille ...



A noter qu'en respect de l'avis de la Commission d'Évaluation des Produits et Prestations rendu en 2009, la prescription de consommables est assurée par le prescripteur initial ou par un médecin en relation avec ce dernier.





LES ÉLECTRODES

[FICHE PRATIQUE TENS]

ÉLECTRODES AUTOCOLLANTES REPOSITIONNABLES


Les électrodes Dura-Stick® Nerve respectent drastiquement le cahier des charges de remboursement fixé par la Haute Autorité de Santé en 2009.

DESCRIPTIF :

- Conduction : carbone
- Gel autocollant 1,6 +/- 0,4 mm
- Revêtement textile souple gris (non lavable)
- Existe en format Rond diam. 32 mm, Rond diam. 50 mm, Carré 50 x 50 mm et Rectangulaire 50 x 90 mm
- Connectique filaire : fiches bananes 2 mm universelles

RÉFÉRENCE ET CODES :

Référence	Code GTIN	Dénomination
42219V	0888912341189	Dura-Stick® Nerve Fil Ø 32 mm (sachet de 4)
42197V	0888912340939	Dura-Stick® Nerve Fil Ø 50 mm (sachet de 4)
42198V	0888912340953	Dura-Stick® Nerve Fil 50 x 50 mm (sachet de 4)
42199V	0888912341189	Dura-Stick® Nerve Fil 50 x 90 mm (sachet de 4)

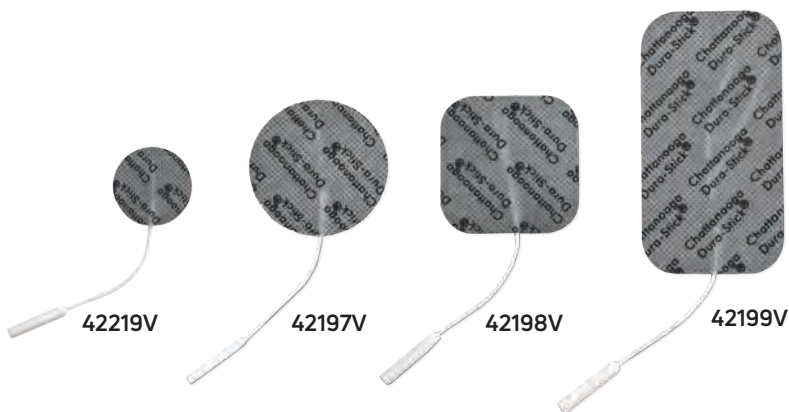

ÉLECTRODES AUTOCOLLANTES REPOSITIONNABLES

Les électrodes pour peaux sensibles Dura-Stick® Nerve Blue gel sont particulièrement appréciées par les patients utilisant intensivement la neurostimulation transcutanée et pouvant présenter des rougeurs/allergies. Souplesse et longévité caractérisent cette électrode haut de gamme.

DESCRIPTIF :

- Revêtement polyuréthane, gris lavable.
- Conduction : Respect des exigences HAS avec conduction 100 filaments d'acier assurant une répartition optimale du courant et un meilleur confort de stimulation
- Gel hypoallergénique Blue Gel - peaux sensibles
- Connectique universelle Fil 2 mm femelle
- Existe en format Carré 50 x 50 mm et Rectangulaire 40 x 90 mm

Les électrodes Dura-Stick® Nerve répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

RÉFÉRENCE ET CODES :

Référence	Code GTIN	Dénomination
42211V	0888912341103	Dura-Stick® Nerve Blue gel 50 x 50 mm (sachet de 4)
42212V	0888912341127	Dura-Stick® Nerve Blue gel 40 x 90 mm (sachet de 4)

